

Rękawica przedoperacyjna PG001

CECHY

- Bezpieczny i higieniczny sposób usuwania włosów i ich drobinek z pacjentów po strzyżeniu
- Ergonomiczny kształt i połączenie materiałów gwarantują wyjątkowe dopasowanie i precyzyjną obsługę
- Klej nie zostaje na skórze pacjenta i jest testowany dermatologicznie
- Po zakończeniu pracy rękawicę można odwrócić na wierzch, co ułatwia jej usunięcie
- Rozmiar uniwersalny



ZALETY

- Szybsze, łatwiejsze i skuteczniejsze oczyszczanie pacjenta niż w przypadku metod tradycyjnych
- Wygodne zapobieganie zakażeniom - rękawica odpowiednio przygotowuje pacjenta do zabiegu
- Bezpieczny i higieniczny sposób usuwania obciętych włosów i drobinek po strzyżeniu

ZASTOSOWANIE

- Przylepna strona rękawicy zbiera obcięte włosy, zapewniając czyste pole operacyjne
- Po zakończeniu pracy rękawicę odwraca się wewnętrzną stroną na wierzch, co znacznie ułatwia utrzymanie odpowiednich standardów higieny
- Unikalne rozwiązanie do strzyżenia w połączeniu ze strzygarką chirurgiczną ME Medical

INSTRUKCJA UŻYCIA RĘKAWICY PRZEDOPERACYJNEJ

01



Włóż rękę do rękawicy

02



Powoli odklej papierowy podkład

03



Zbierz włosy i inne drobinki poprzez delikatne dotykane wybranego obszaru

04



Usuń rękawicę przedoperacyjną, ściągając ją wywracając wewnętrzną stronę na wierzch